

Guide to Selecting KSK Rubber Dam Clamps

TOP 20 selection

デンテックのラバーダムクランプは、特に吟味されたステンレスを使用しています。

バネ性・耐食性ともに優れています。

形態が豊富なため、歯牙に応じたクランプを選択することができます。

製造ロット毎に金属疲労テストを行い、合格したものだけを製品として出荷しております。


すべてのクランプ曲げを職人がひとつひとつ手作業で調整しており、品質が均一です。

ピークは全て刃付けされているため、歯牙へのフィット感に優れています。

ブラックとマットのクランプは、強くまぶしい光による眼精疲労を防ぐための特殊加工を施しています。

全てのクランプは日本製です。

ラバーダムコンプリートセット

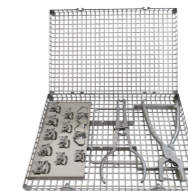

セット内容:

- ① クランプ付ボード#12
- ② ヤングフレーム 大
- ③ ラバーダムパンチ
- ④ KSKクランプフォーセップス




ラバーダムスターターキット

セット内容:

- ① クランプ付ボード#12
- ② ヤングフレーム 大
- ③ ラバーダムパンチ
- ④ KSKクランプフォーセップス
- ⑤ ラバーダムテンプレート
- ⑥ ノンラテックスデンタルダム (20枚入り)

クランプの種類:

- 210, 9, 0, 2, 2A, 206,
207, 5, 56, 7, 201, 202

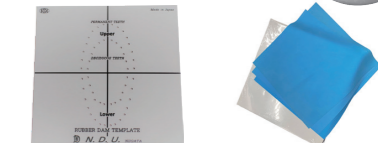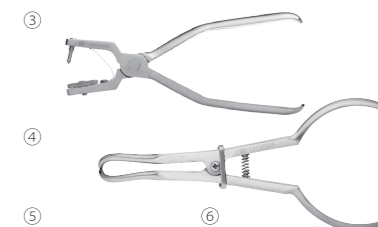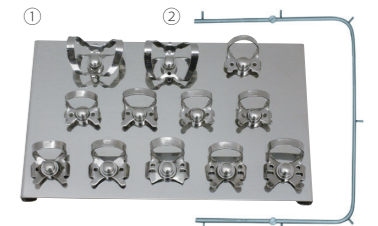

クランプボード # 8

ステンレス製
サイズ: 90 × 90mm



クランプ付ボード: 9×2, 2A, W2A, 5, 56,
203, 204

または
クランプボードのみ

クランプボード # 12

ステンレス製
サイズ: 150 × 90mm




クランプ付ボード: 210, 9, 0, 2, 2A, 206,
207, 5, 56, 7, 201, 202

または
クランプボードのみ

クランプボード # 18

ステンレス製
サイズ: 160 × 120mm

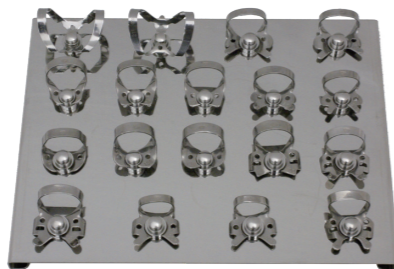

クランプ付ボード: 210, 9, P-1, P-2, 22, 27,
29, 208, 209, 18, 138, 139,
7, 201, 202, 203, 204, 205

または
クランプボードのみ

乳歯用クランプボード マット


ステンレス製
サイズ: 90 × 90mm



- | | |
|-----------|-----------|
| 54- 上顎右 D | 64- 上顎左 D |
| 55- 上顎右 E | 65- 上顎左 E |
| 85- 下顎右 E | 75- 下顎左 E |
| 84- 下顎右 D | 74- 下顎左 D |
- または
クランプボードのみ

株式会社 **デンテック**

TEL: 03-3964-2011 FAX: 03-3962-5624
Web: www.dentech.co.jp E-mail: info@dentech.co.jp
〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

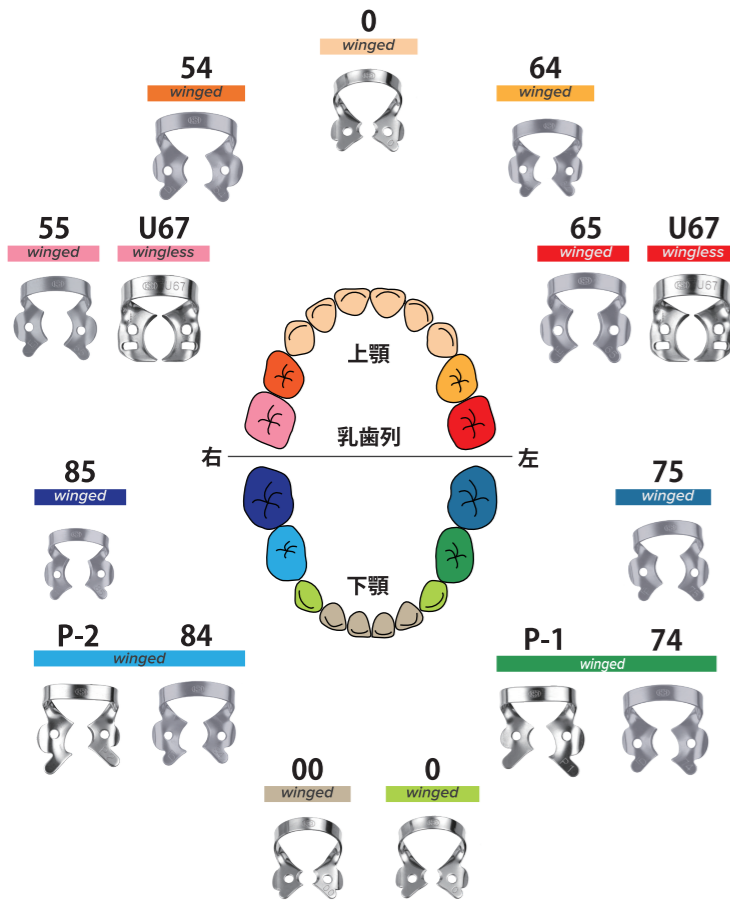


ラバーダムクランプ
歯科用ラバーダムクランプ 一般医療機器
13B2X00094000008

クランプ付ボード
歯科用ラバーダムクランプ 一般医療機器
13B2X000940000089

ラバーダムコンプリートセット
歯科用ラバーダム防湿キット 一般医療機器
13B2X000940000081

ラバーダムスターターキット
歯科用ラバーダム防湿キット 一般医療機器
13B2X00094000171

3色 TM10, TM11, ディスタル, 小児用クランプはマットのみ

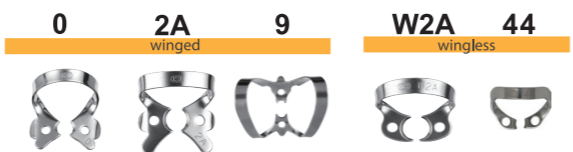

0 狭い歯頸部の小臼歯に使用され、小児の上顎前歯にも適合します。

2A 大きめの上下顎小臼歯用で、2の一回り大きいタイプです。

9 前歯唇面窩洞に広く用いられます。

W2A 2Aと同じ歯に使用される無翼型のクランプです。

44 平らなピークを持つ、前歯用クランプです。



9 前歯唇面窩洞に広く用いられます。

44 平らなピークを持つ、前歯用クランプです。



0 狭い歯頸部の小臼歯に使用され、小児の上顎前歯にも適合します。

9 前歯唇面窩洞に広く用いられます。

44 平らなピークを持つ、前歯用クランプです。



0 狭い歯頸部の小臼歯に使用され、小児の上顎前歯にも適合します。


1 小臼歯の歯根用です。ピークが深くなっています。

2A 大きめの上下顎小臼歯用で、2の一回り大きいタイプです。

206 上下顎の小臼歯用の有翼型です。ピークに反りがあるため歯頸部に深く掛けることができます。

W2A 2Aと同じ歯に使用される無翼型のクランプです。

Y10 上下顎に使用できます。歯頸部に食い込ませる形状のため歯へのフィット感があります。

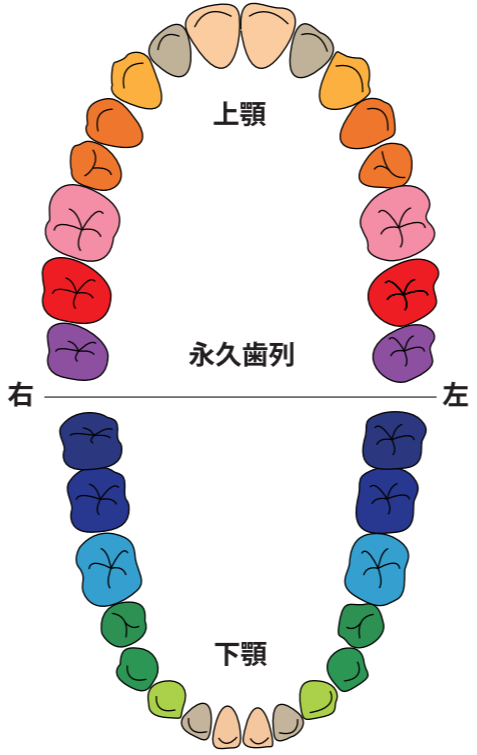

14 半萌出の掛かりにくい症例に使用され、小児の上顎前歯にも適合します。

201 上顎大臼歯用で、歯頸部の治療に適しています。

W8A 上顎大臼歯の歯根用クランプで、歯肉縁下を把持できる形状です。

26 上顎大臼歯の歯頸の露出している歯に使用します。第二乳臼歯にも使用できます。

42 歯肉圧排用のクランプです。上顎左の大臼歯用で、ピークが平らです。

43 歯肉圧排用のクランプです。上顎右の大臼歯用で、ピークが平らです。

U67 上顎の6,7番に適した無翼型のクランプでコンパクトです。



12A 特に上顎左の第三大臼歯と下顎右の第三大臼歯に適合します。把持部に滑り止めのギザがついています。

13A 特に上顎右の第三大臼歯と下顎左の第三大臼歯に適合します。把持部に滑り止めのギザがついています。

14 半萌出の掛かりにくい症例に使用され、しっかり把持できる形状です。

201 上顎大臼歯用で、歯頸部の治療に適しています。

ディスタル 最後臼歯用です。乳歯の最後臼歯にも使用できます。※販売は関日本歯科工業社



W8A 上顎大臼歯の歯根用クランプで、歯肉縁下を把持できる形状です。

TM10 左の上顎最後臼歯用です。遠心側に湾曲したスプリングで、臼歯へのアクセスが容易で視野が広がります。

TM11 右の上顎最後臼歯用です。遠心側に湾曲したスプリングで、臼歯へのアクセスが容易で視野が広がります。

26 上顎大臼歯の歯頸の露出している歯に使用します。第二乳臼歯にも使用できます。

42 歯肉圧排用のクランプです。上顎左の大臼歯用で、ピークが平らです。

43 歯肉圧排用のクランプです。上顎右の大臼歯用で、ピークが平らです。

U67 上顎の6,7番に適した無翼型のクランプでコンパクトです。



12A 特に上顎左の第三大臼歯と下顎右の第三大臼歯に適合します。把持部に滑り止めのギザがついています。

13A 特に上顎右の第三大臼歯と下顎左の第三大臼歯に適合します。把持部に滑り止めのギザがついています。

14 半萌出の掛かりにくい症例に使用され、しっかり把持できる形状です。

201 上顎大臼歯用で、歯頸部の治療に適しています。

ディスタル 最後臼歯用です。乳歯の最後臼歯にも使用できます。※販売は関日本歯科工業社



W8A 上顎大臼歯の歯根用クランプで、歯肉縁下を把持できる形状です。

TM10 左の上顎最後臼歯用です。遠心側に湾曲したスプリングで、臼歯へのアクセスが容易で視野が広がります。

TM11 右の上顎最後臼歯用です。遠心側に湾曲したスプリングで、臼歯へのアクセスが容易で視野が広がります。

26 上顎大臼歯の歯頸の露出している歯に使用します。第二乳臼歯にも使用できます。

42 歯肉圧排用のクランプです。上顎左の大臼歯用で、ピークが平らです。

43 歯肉圧排用のクランプです。上顎右の大臼歯用で、ピークが平らです。




0 狭い歯頸部の小臼歯に使用され、小児の上顎前歯にも適合します。

1 小臼歯の歯根用です。ピークが深くなっています。

2 下顎小臼歯用で、ピークが平らです。

2A 大きめの上下顎小臼歯用で、2の一回り大きいタイプです。

206 上下顎の小臼歯用の有翼型です。ピークに反りがあるため、歯頸部に深く掛けることができます。

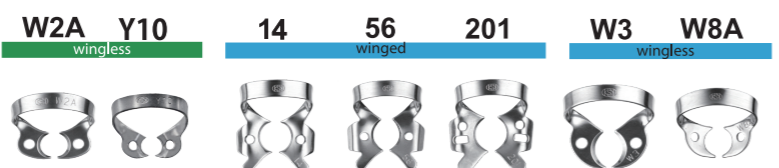

W2A 2Aと同じ歯に使用される無翼型のクランプです。

Y10 上下顎に使用できます。歯頸部に食い込ませる形状のため歯へのフィット感があります。

14 半萌出の掛かりにくい症例に使用され、しっかり把持できる形状です。

56 下顎大臼歯用のクランプで、ピークの反りがあり、歯頸部の治療に適しています。

201 上顎大臼歯用で、歯頸部の治療に適しています。

W3 小さめの下顎大臼歯用で、ピークは平らで歯肉に食い込みません。

W8A 上顎大臼歯の歯根用クランプで、歯肉縁下を把持できる形状です。



0 狭い歯頸部の小臼歯に使用され、小児の上顎前歯にも適合します。

2 下顎小臼歯用で、ピークは平らです。

2A 極大きめの上下顎小臼歯用で、2の一回り大きいタイプです。

9 前歯唇面窩洞に広く用いられます。

W2A 2Aと同じ歯に使用される無翼型のクランプです。

44 平らなピークを持つ、前歯用クランプです。



9 前歯唇面窩洞に広く用いられます。

44 平らなピークを持つ、前歯用クランプです。



0 狭い歯頸部の小臼歯に使用され、小児の上顎前歯にも適合します。

9 前歯唇面窩洞に広く用いられます。

44 平らなピークを持つ、前歯用クランプです。



ラバーダムクランプ
歯科用ラバーダムクランプ 一般医療機器
13B2X00094000008

ディスタルクランプ プラスト
歯科用ラバーダムクランプ 一般医療機器
13B2X00094000125