

動物用医療機器
一般医療機器

類別：機械器具 医療用のこぎり
一般的な名称：医療用のこぎり
テクニカ動物用のこぎり

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

- (1) 本品の取付けは、本品を確実に奥まで挿入し、固定されていることを確認すること。[器具の破損や脱落につながるおそれがある。]
- (2) 本品の加工・改造は行わないこと。[器具の破損や不適切な設置による術後成績不良が発生するおそれがある。]
- (3) 変形や破損した場合は使用しないこと。[器具の破損や不適切な設置による術後成績不良が発生するおそれがある。]


【形状・構造及び原理等】

原材料：ステンレス鋼、アルミ合金
形状：

- (1) テクニカ パテラソー S

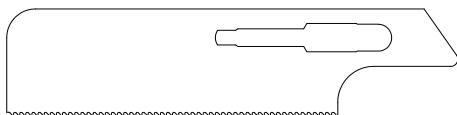

- (2) テクニカ パテラソー L

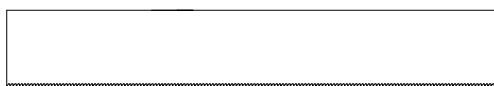

- (3) テクニカ パテラソー L用ハンドル（レンチ付属）



【使用目的又は効果】

手術時に動物の骨を切断するために用いる。

【使用方法等】

使用前に必ずブレードの刃部に変色やダメージの無いことを確認する。テクニカ パテラソー Sは市販のNo.4ハンドルに、テクニカ パテラソー Lはテクニカ パテラソー L用ハンドルに装着する。本品の刃を切断する骨にあて、前後に動かして使用する。

【使用上の注意】

- (1) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- (2) 本品は刃物であるため、取り扱いには充分注意すること。
- (3) 使用後は感染予防のため、直ちに滅菌消毒を行なうこと。

[使用方法に関する使用上の注意]

- (1) 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行ない、次回からの使用時にも同様に行なうこと。
- (2) 使用するまで常に滅菌後の汚染に注意し、手指や未滅菌の器具などで直接触れないこと。
- (3) 変形や破損のないことを確認すること。使用に適さない場合には、新しいものと交換すること。
- (4) 誤ったサイズでの使用は医療事故につながる危険性があるため、本品を使用する前に必ずサイズを確認すること。
- (5) 鎌や変色のおそれがあるため、長時間、生理食塩水に浸漬しないこと。

ないこと。

- (6) 本品を使用中に切削性が低下したり、汚染したおそれのある場合には、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 鎌びる恐れがあるため水分・血液などが付着したまま保管しないこと。
- (2) 本品は汚染及び鎌を防ぐ為、湿度が低く、清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 消毒用薬液、洗浄剤の濃度・浸漬時間・温度など使用方法は、各メーカーの指示に従い正しく使用すること。消毒用薬液としては次のものを推奨する。

グルタラール製剤(ハイドリッドなど)、グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテンなど)、界面活性剤系薬液(塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルコニウム液、両性界面活性剤などを含む薬液)は使用不可だが、これらの薬剤を含んでいても、防鎌効果を謳っているものは使用可能。但し、一部の防鎌効果のある両性界面活性剤に長時間又は高温下で浸漬した場合、変色を起こすおそれがあるので注意すること。

- (2) 次の成分を含む消毒用薬液は、鎌への影響が高いので使用しないこと。

塩素系薬液(次亜塩素酸ナトリウムなど)、過酸化物系薬液(オキシドールなど)、強酸性水、及び防鎌効果のない界面活性剤系薬液(塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルコニウム液、両性界面活性剤など)。

- (3) 乾熱滅菌は、高温になり劣化の原因になるので使用しないこと。

- (4) オートクレーブ滅菌の場合、機種・条件によっては滅菌バッグが湿った状態で乾燥工程が終了することがあり、その際、滅菌バッグと本品とが直接接していると鎌が発生する原因となるので、滅菌ケースなどを用いて本品と滅菌バッグとが直接接触しないようにして滅菌すること。

- (5) 鎌びた本品は、汚染を引き起こす可能性があるので、鎌びていない製品と一緒に滅菌しないこと。

- (6) 灰塵後は鎌がないか点検し、鎌が認められた場合には、新しいものと交換すること。

- (7) 鎌びたおそれがあるため次のことについて留意すること。

- ・血液・骨が凝固付着したまま乾燥させないこと。
- ・最終洗浄は精製水を使用すること。
- ・湿度が高くて自然乾燥に時間が要する場合には、ドライヤーなどで強制的に乾燥させること。
- ・汚れ、水分、洗浄剤などが付着したまま滅菌しないこと。
- ・オートクレーブ滅菌の場合、精製水を用い、水道水は使用しないこと。

- (8) 本製品使用後は、すぐに消毒用薬液(上記(1)、(2)参照)又は消毒効果及び防鎌効果のある洗浄剤に浸漬し、その後、超音波洗浄器、ブラシなどを用いて洗浄し、刃部などの付着物を完全に除去すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町53-5

TEL : 03-3964-2011

FAX : 03-3962-5624

2. 販売業者

有限会社 テクニカ

〒174-0053 東京都板橋区清水町53-5

TEL : 03-5375-0605

FAX : 03-3962-5624